

 ***Trifil***

**PROTEÇÃO**



MODELAGEM **ANATÔMICA**

TOQUE **MACIO**




PROTEÇÃO

DUPLA **CAMADA**

**SEM** COSTURA



**KIT 001**

0001 BRANCO

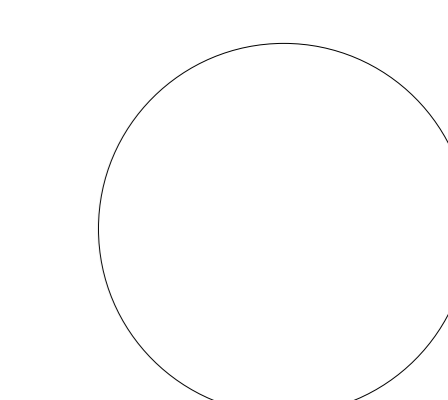


**KIT 0008**

0008 PRETO

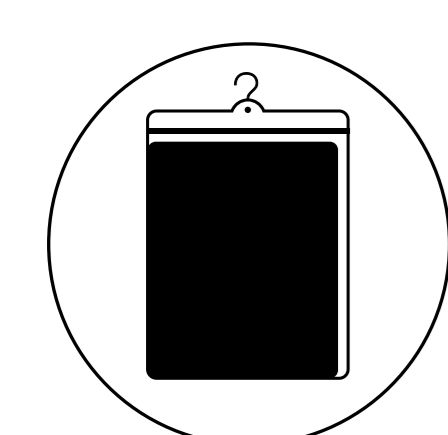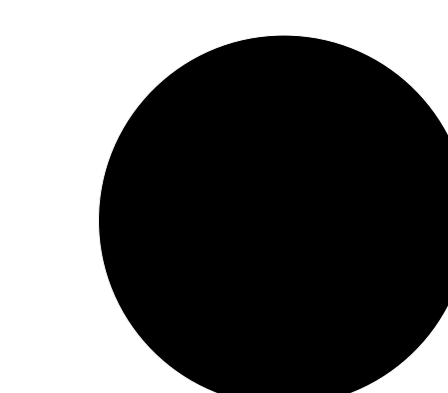

ENCARTE +  
EMBALAGEM PVC

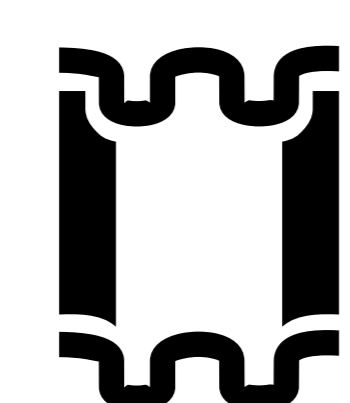

DUPLA CAMADA  
SEM COSTURA

**W06103** KIT 3X1 MÁSCARA FACIAL SEM COSTURA  
COMPOSIÇÃO: 98% POLIAMIDA, 02% ELASTANO.



MODELAGEM **ANATÔMICA**  
TOQUE **MACIO**



PROTEÇÃO


DUPLA **CAMADA**  
**SEM** COSTURA

**KIT 001**

- OGJ8 AZUL KEIN 
- OXO1 AZUL MARINHO 
- OJG4 VINHEDO 



ENCARTE +  
EMBALAGEM PVC

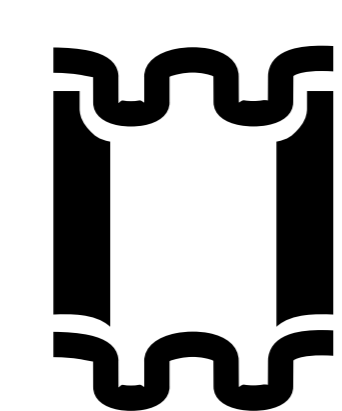


DUPLA CAMADA  
SEM COSTURA

**W06110** KIT 3X1 MÁSCARA FACIAL INFANTIL SEM COSTURA  
COMPOSIÇÃO: 98% POLIAMIDA, 02% ELASTANO.

# COMO USAR SUA MÁSCARA FACIAL?

## COMO COLOCAR A MÁSCARA

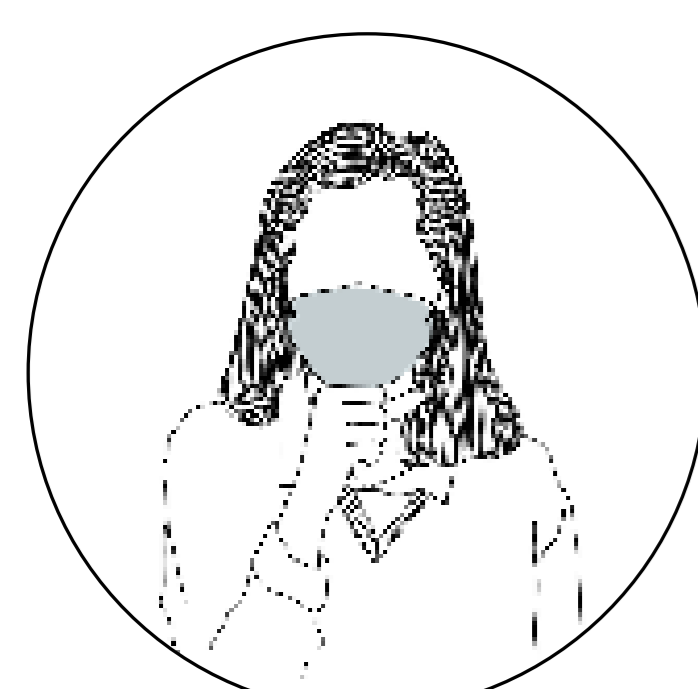


A MÁSCARA É INDIVIDUAL E NÃO DEVE SER COMPARTILHADA COM NINGUÉM, NEM ENTRE FAMILIARES.




ANTES DE COLOCAR A MÁSCARA, LAVE BEM AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO, SECANDO-AS BEM, PARA ENTÃO COLOCAR A MÁSCARA COM CUIDADO, COBRINDO A BOCA E O NARIZ E ACOMODANDO-A COM SEGURANÇA PARA MINIMIZAR OS ESPAÇOS ENTRE O ROSTO E A MÁSCARA.

## COMO RETIRAR A MÁSCARA

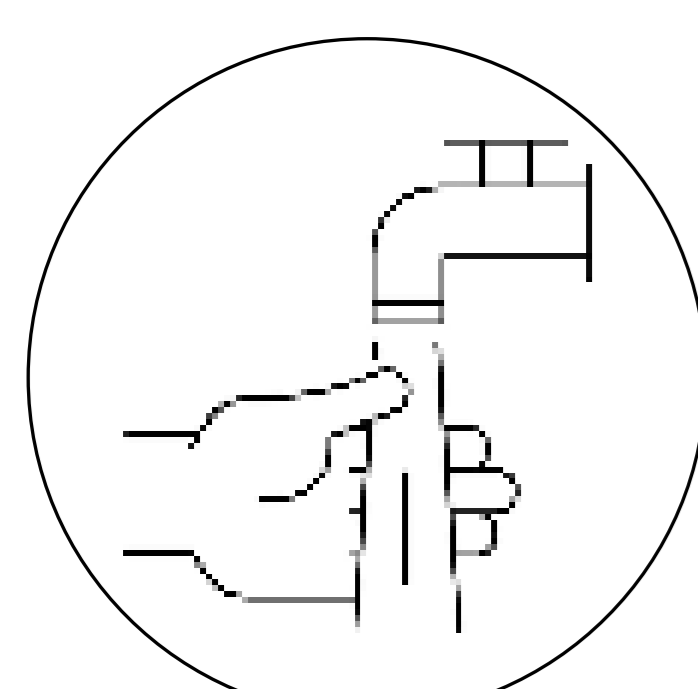

**PASSO 1** – ANTES DE RETIRAR A MÁSCARA LAVE AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO, SECANDO-AS BEM.

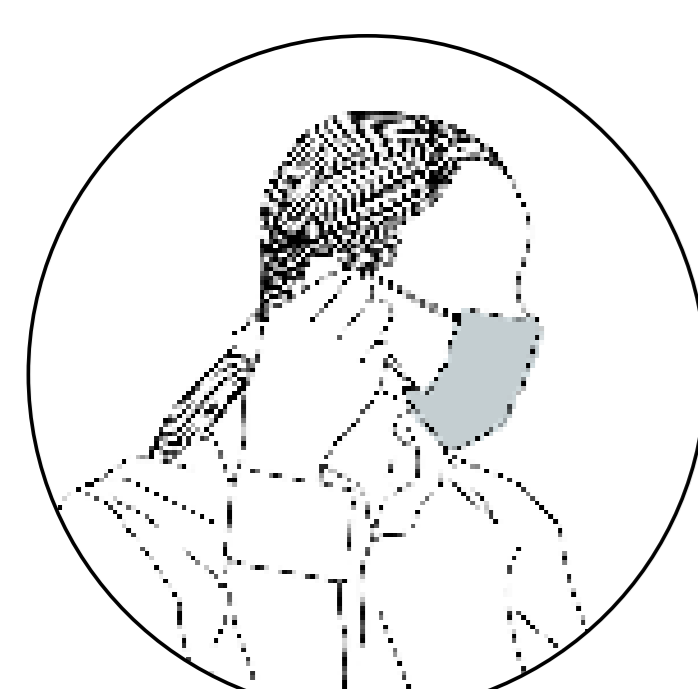


**PASSO 2** – REMOVA A MÁSCARA PEGANDO PELA TIRA LATERAL, EVITANDO TOCAR NA PARTE DA FRENTE.


**PASSO 3** – COLOQUE A MÁSCARA USADA EM UM SACO PLÁSTICO E GUARDE, ASSIM QUE POSSÍVEL REALIZAR A LAVAGEM. NÃO REUTILIZE A MÁSCARA USADA.

**PASSO 4** – LAVE NOVAMENTE AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO POR NO MÍNIMO 20 SEGUNDOS.

## LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA MÁSCARA

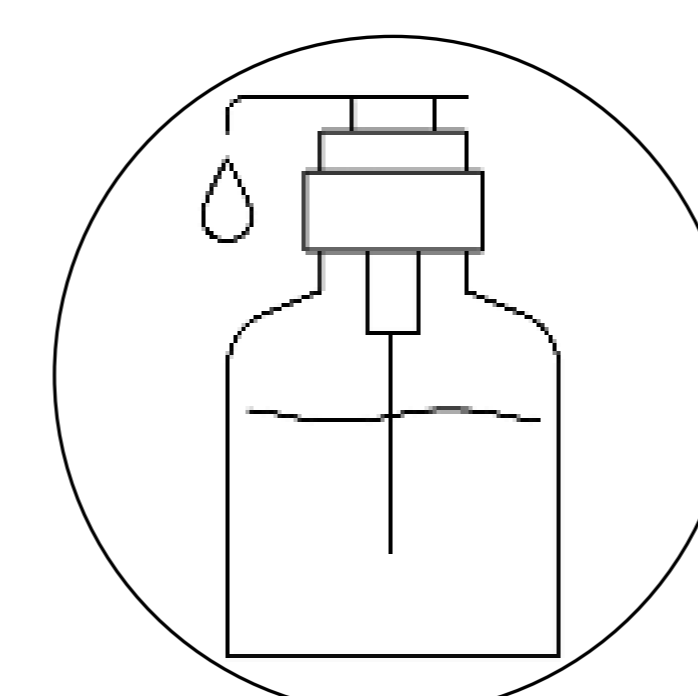

**PASSO 1** – LAVE AS MÁSCARAS USADAS COM UMA SOLUÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E ÁGUA SANITÁRIA COMERCIAL (2,0 A 2,5%) NA PROPORÇÃO DE 1 PARTE DE ÁGUA SANITÁRIA PARA 50 PARTES DE ÁGUA POTÁVEL (EXEMPLO: 20 ML DE ÁGUA SANITÁRIA PARA 1 LITRO DE ÁGUA), DEIXE-AS DE MOLHO POR 30 MINUTOS. APÓS O TEMPO DE IMERSÃO, REALIZE O ENXAGUE EM ÁGUA CORRENTE.

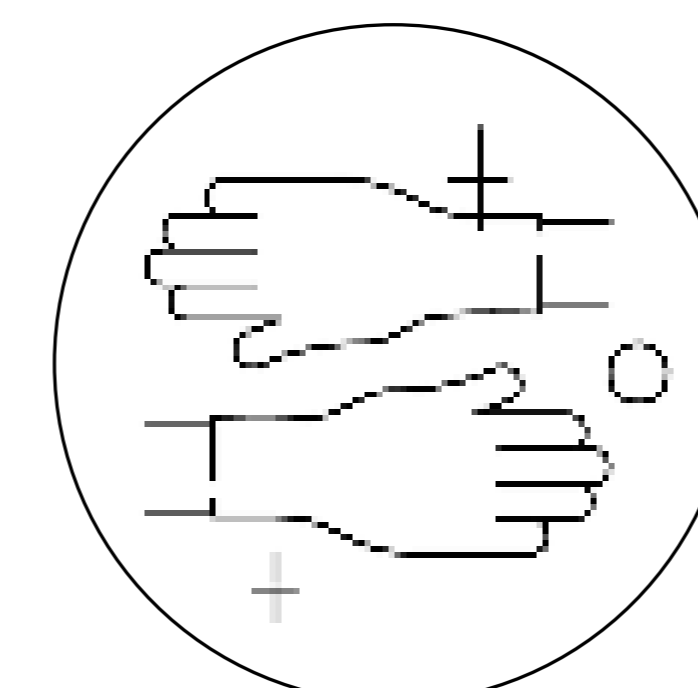

**PASSO 2** – DEIXE SECAR À SOMBRA.

**PASSO 3** – DEPOIS DE SECA, COLOQUE-A EM UM SACO PLÁSTICO OU RECIPIENTE LIMPO, PARA QUE NÃO HAJA CONTAMINAÇÃO ATÉ O USO. **LEMBRE-SE QUE A MÁSCARA DEVE ESTAR BEM SECA PARA SUA REUTILIZAÇÃO.**

### IMPORTANTE:

- TROCAR A MÁSCARA SEMPRE QUE APRESENTAR SUJIDADE OU UMIDADE.
- DESCARTAR A MÁSCARA SEMPRE QUE APRESENTAR SINAIS DE DETERIORIZAÇÃO OU FUNCIONALIDADE COMPROMETIDA.
- O USO CONTÍNUO DE ALTAS CONCENTRAÇÕES DE ÁGUA SANITÁRIA DURANTE A LAVAGEM PODE AMARELAR O PRODUTO, PORÉM SUAS FUNÇÕES PERMANECEM INALTERADAS.
- A UTILIZAÇÃO DA MÁSCARA É APENAS MAIS UMA MEDIDA DE PROTEÇÃO, NÃO DEVEM SER NEGLIGENCIADAS AS OUTRAS ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA OMS.